

Instalación de Speed Connect

1

Comprobar la versión del software (Ajustes → Sobre Speed Reader):

a. Si la versión es 1.3.0 o superior no hace falta actualizar, ya que es la versión que contiene el dispositivo USB.

b. Si la versión es inferior a 1.3.0, antes de actualizar se debe hacer una **copia de seguridad** de los datos (Ajustes → USB/SD Copia → Copiar datos → Insertar el USB plateado → Seleccionar la opción "USB" → Guardar).

- Una vez hecha esta acción, no se debe extraer el dispositivo USB, ya que es necesario para el siguiente paso.

2

Actualización del software (Ajustes → Sistema → Actualización → USB → OK).

- En caso de que aparezca el mensaje "Sin llave USB", se debe insertar la memoria USB en otro puerto.
- Esta operación lleva unos 2 minutos. No se debe apagar el Speed Reader durante este proceso, ya que se podrían producir daños.

3

Comprobar la versión del software para asegurarse que la actualización ha sido efectiva (Ajustes → Sobre Speed Reader).

- Deberá aparecer la versión 1.3.0. Si la actualización se ha efectuado de forma correcta, extraer el dispositivo USB plateado del puerto USB y guardarlo.

4

Conexión a la red Wi-Fi (Conectar el dispositivo USB más pequeño en un puerto USB → Ajustes → Conexión → WIFI → ON → Seleccionar la red Wi-Fi correspondiente → Insertar contraseña → Conectar).

- Si la conexión ha sido efectiva, el icono de la red Wi-Fi deberá aparecer en el borde superior derecho de la pantalla.

5

Creación de la cuenta (Acceder a speed-connect.vet → Crear nueva cuenta → Añadir datos de la Cuenta Speed (correo electrónico, nombre, apellido y contraseña) → Añadir información de la clínica/hospital → Emparejamiento del dispositivo).

- El Nombre del Speed Reader es libre, siendo el ideal: Speed Reader + Nombre de la clínica/hospital
- El Número de serie se encuentra en la parte inferior del Speed Reader, justo debajo del código de barras
- El Process Number se encuentra en Ajustes → Sobre Speed Reader → Process Number

6

Sincronizar los datos de Speed Reader con Speed Connect (Ajustes → Servidor de sincronización → Iniciar)

7

Acceder a speed-connect.vet con la nueva cuenta y contraseña, donde ya se podrán visualizar a todos los resultados generados por el Speed Reader.